


# MAIL 시스템 실행 프로세스

## STEP 1

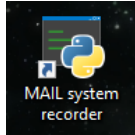

수술 시작할 때 마다,  
위 프로그램 실행

## STEP 2

① 고객번호(9자리) 입력 후,  
② 입력완료 클릭

## STEP 3

① 입력한 고객정보 확인 후,  
제대로 입력했다면 'Yes' 눌러 기록 시작  
② 입력 정보 수정하고 싶다면 'No'  
눌러 수정

## STEP 4

기록 중 화면  
해당 화면이 뜨는 지 확인하신 후  
수술 진행하시면 됩니다.  
수술 중 프로그램 종료하시면  
안 됩니다.

## STEP 5

수술 끝났을 때 ① 기록 종료 클릭  
팝업창 ② yes 클릭 시 기록이  
완료되며 자동 종료

에러 메시지가 뜬다면, HOBIT lab 010-5131-5643 or 내선 1237 or 070-4014-7819로 연락 부탁드립니다. 감사합니다 ☺